


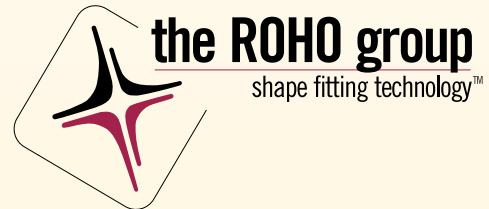

# Quadro<sup>®</sup> SELECT<sup>®</sup>



*Uniek ISO-FLO<sup>™</sup> systeem*

# Quadro<sup>®</sup> SELECT<sup>®</sup>

*De revolutionaire ISOFLO™ Memory Control™ biedt een unieke pasvorm, ter bevordering van de functionaliteit, terwijl de gebruiker op het kussen zit. Met de geboden eenvoudige aanpassing is het niet langer noodzakelijk maximale huidbescherming op te offeren om stabiliteit, positionering en comfort te krijgen.*

## POSITIONERING

Het Quadro<sup>®</sup> SELECT<sup>®</sup> kussen laat een snelle en eenvoudige positionering van iedere gebruiker toe zonder dat een transfer in of uit de rolstoel nodig is. Door een "druk op de knop" kan het kussen aan de gewenste zithouding van de gebruiker worden aangepast. Wanneer de juiste houding is gevonden, wordt deze positie gefixeerd door de ISOFLO te sluiten.

## HUIDBESCHERMING

Door een aanpasbare omgeving met weinig schuifkrachten, is dit gepatenteerde ontwerp niet alleen ter voorkoming van decubitus, maar helpt ook bij het genezingsproces.

## STABILITEIT

Het Quadro<sup>®</sup> SELECT<sup>®</sup> kussen biedt een nieuw niveau van stabiliteit. Stabiliteit is verbeterd door de lucht in de vier compartimenten vast te zetten met gebruik van de ISOFLO. Hierdoor is het onmogelijk dat de lucht door het kussen circuleert, wat zijwaartse en voor-achterwaartse bewegingen beperkt.

## COMFORT

Alle houdingsaanpassingen kunnen eenvoudig worden gedaan zonder dat de gebruiker een transfer uit de rolstoel moet maken. Het kussen laat ook selectieve en geleidelijke houdingsveranderingen toe tijdens de dag, wanneer bepaalde activiteiten dit vereisen.

## KENMERKEN & VOORDELEN

- Aanpasbaar: Geschikt voor specifieke zitbehoeften en unieke lichaamseigenschappen.

- Lichtgewicht: Makkelijk in gebruik, gewicht: 2 kg.
- Wasbaar: Kussen kan makkelijk worden schoongemaakt met zeep en water. De hoes kan in de wasmachine. Ook is het mogelijk de hoes en het kussen te desinfecteren.
- Repareerbaar: Het kussen is gemaakt van neopreen, dit materiaal kan makkelijk worden gerepareerd.
- Ventilatie: Aparte luchtcellen maken het mogelijk dat lucht circuleert en het huidoppervlak bereikt, dit zorgt voor een koele omgeving.
- Hypo-allergeen: Het kussen is gemaakt van hypo-allergeen materiaal.

## GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Het Quadro Select kussen is het meest geschikt voor gebruikers:

- Die een hoge mate van huidbescherming nodig hebben
- Die houdingscorrecties nodig hebben
- Die de mogelijkheid willen hebben verschillend gepositioneerd te worden
- Die veel ondersteuning nodig hebben
- Met weinig evenwicht

## SPECIFICATIES

Materiaal: Vlamwerend neopreen

## STANDAARD BESCHIKBARE MATEN

Van 38 x 38 cm tot 48 x 48 cm.

Voor meer informatie zie RvS Prijslijst



Technische wijzigingen, drukfouten en kleurafwijkingen in ons drukwerk zijn voorbehouden.

vakadvies - verkoop - service

rvs  nederland

postbus 1425, 1300 BK Almere  
telefoon 036 - 532 04 50  
fax 036 - 532 13 08  
e-mail: rvs.ned@seenus.nl  
www.seenus.nl