

Mepilex® Border

Nieuwe* versie Mepilex® Border Zelfklevend, zacht siliconenverband

* Nieuwe versie vanaf augustus 2006

Mepilex® Border heeft een zelfklevende rand op basis van zachte siliconen om zonder extra fixatie ter plaatse te blijven. De nieuwe versie van Mepilex® Border heeft een verbeterde film en een verbeterd absorberend schuimkussen en blijft langer en beter ter plaatse op vochtige of natte wonden.

Minder frictie tegen kleding of beddengoed: blijft beter ter plaatse

De kleefrand is nu transparanter: discreter

Sterkere fixatie: blijft beter ter plaatse



3 laags wondkussen:

grotere absorptie, retentie en minder risico op lekkage en maceratie


Safetac® laag (zachte siliconen)

- atraumatisch bij verbandwisseling
- fixeert zich enkel op droge huid
- kleeft niet in de wond
- vermindert het risico op maceratie


Safetac
TECHNOLOGY

Safetac® is een unieke, gepatenteerde, zachte siliconentechnologie. Safetac® verbanden betekenen een grote vooruitgang binnen de wondzorg: zij minimaliseren trauma aan de wondbodem en aan de omgevende huid, zij minimaliseren pijn voor de patiënt en voorkomen verweking van de wondomgeving door deze volledig af te sluiten. Safetac® verbanden verkleven niet in de wond.


Gebruiksaanwijzing

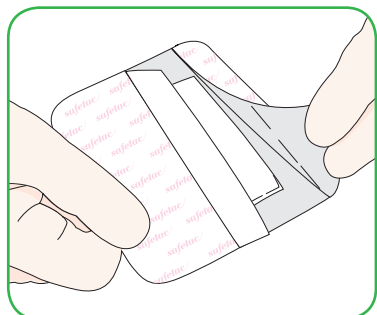

Reinig de wond. De wondomgeving grondig droog deppen. Zorg ervoor dat de huid schoon is en vrij van zalven of hydraterende crèmes. Verwijder het bovenste schutblad. Het schuimkussen moet de wond overlappen.

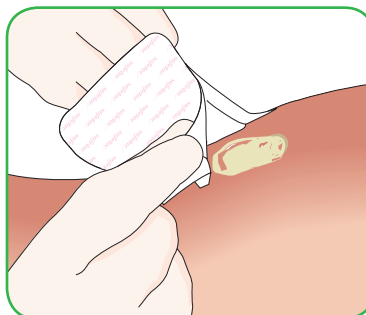

Positioneer eerst de kant waarvan het schutblad reeds verwijderd is en houd het 2de gedeelte omhoog. Breng de klevende zijde op de wond aan. Alvorens het 2de gedeelte te plaatsen, het 2de schutblad verwijderen. Maak hiervoor gebruik van het lipje. Let op! Mepilex® Border mag niet verknipt worden ter hoogte van het wondkussen.

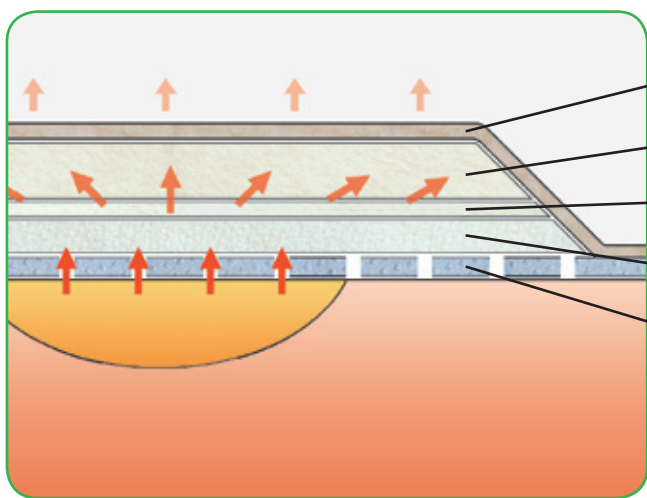

Hoe werkt Mepilex® Border?

- **Topfilm**
 - Sterk ademend voor optimale verdamping
 - **Retentielaag**
 - Voorkomt dat wondvocht naar de huid wordt teruggedrukt
 - **Verspreidingslaag**
 - Verspreidt wondvocht naar de retentielaag
 - **Absorptielaag**
 - Waarborgt snelle en doeltreffende absorptie
 - **Wondcontactlaag met Safetac® technologie**
 - Fixeert zich enkel op droge huid, niet op vochtige wonden. Sluit perfect aan op de wondranden en voorkomt lekkage en maceratie. Atraumatisch voor de wond en de omgevende huid bij verwijdering.
- } **Wondkussen**

Voordelen van Mepilex® Border

- Minimaliseert trauma en pijn™ bij verbandwisseling
- Minimaliseert risico op verweking
- Kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk van de wondconditie
- Verhoogt patiëntencomfort
- Sterke en huidvriendelijke fixatie
- Patiënt kan douchen met het verband

Toepassingen

- vochtige tot zeer natte wonden
- wanneer sterke en huidvriendelijke fixatie nodig is
- decubitus
- traumatische wonden

Voorzorgsmaatregelen

Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen.



Assortiment Mepilex® Border (steriel)

Afmeting	Z-indexnr.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
7,5 x 7,5 cm	14655802	295200	5 x 1 stuk	70 stuks
10 x 10 cm	14655772	295300	5 x 1 stuk	50 stuks
15 x 15 cm	14655780	295400	5 x 1 stuk	50 stuks
15 x 20 cm	14655799	295600	5 x 1 stuk	45 stuks