

Mepilex[®] Lite

Dun, absorberend zacht siliconenverband

- minimaliseert trauma en pijn [™]
- voor droge tot vochtige wonden
- kan ook onder compressietherapie toegepast worden
- vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
- verkrijgbaar in grote afmetingen

Dun schuimkussen (2 mm)

- absorbeert exsudaat
- vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
- desintegreert niet
- zacht en soepel

Polyurethaan film op de rugzijde

- lucht- en waterdampdoorlaatbaar
- waterdicht

Safetac[®] laag (zachte siliconen)


- atraumatisch bij verbandwisseling
- fixeert zich enkel op droge huid
- kleeft niet in de wond
- vermindert het risico op maceratie




Safetac[®]
TECHNOLOGY

Safetac[®] is een unieke, gepatenteerde, zachte siliconentechnologie. Safetac[®] verbanden betekenen een grote vooruitgang binnen de wondzorg: zij minimaliseren trauma aan de wondbodem en aan de omgevende huid, zij minimaliseren pijn voor de patiënt en voorkomen verweking van de wondomgeving door deze volledig af te sluiten. Safetac[®] verbanden verkleven niet in de wond.


Gebruiksaanwijzing

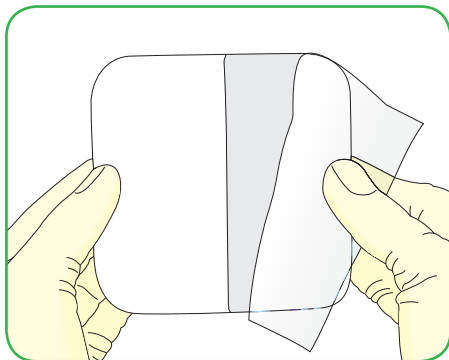

Reinig het wondgebied. De wond-omgeving grondig droog deppen. Verwijder eerst het bovenste schutblad. Laat eventueel het 2de schutblad voorlopig ter plaatse voor een steriele applicatie van het verband.

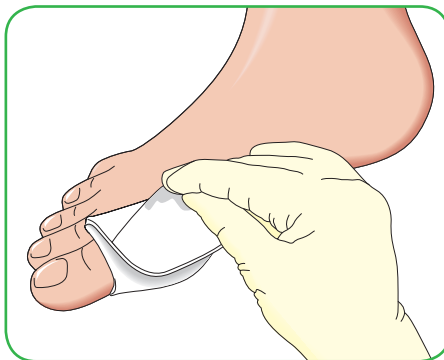

Zorg ervoor dat Mepilex® Lite wordt aangebracht met een overlap van minimum 2 cm op de omliggende huid. Begin met de kant waarvan het schutblad reeds verwijderd is en houd het 2de gedeelte omhoog. Breng de klevende zijde op de wond aan. Het verband niet uitrekken. Alvorens het 2de gedeelte te plaatsen het 2de schutblad eveneens verwijderen. Maak hiervoor gebruik van het lipje.

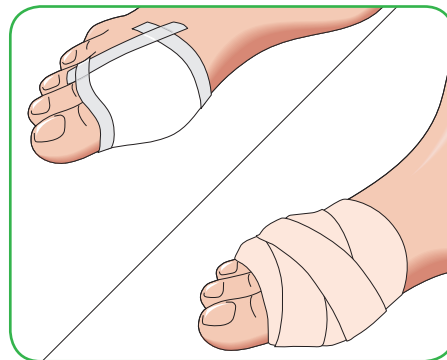

Fixeer Mepilex® Lite met compressie-therapie, een zwachtel of een ander fixatieverband.

Voordelen van Mepilex® Lite

- Minimaliseert trauma en pijn™ bij verbandwisseling
- Minimaliseert risico op verweking
- Autofixatie: de gemakkelijkste applicatie
- Kan opgelicht en teruggeplaatst worden
- Vormt zich perfect naar lichaamscontouren
- Dun en comfortabel
- Zorgt voor een vochtig wondmilieu
- Kan op maat worden geknipt
- Mag eventueel ter plaatse blijven tijdens radiotherapie in samenspraak met de radiotherapeut
- Is niet occlusief (diabetes voet)

Toepassingen

- droge tot vochtige wonden
- diabetes voet
- bestralingswonden
- been en voetulcera
- decubitus
- traumatische wonden, skin tears

Voorzorgsmaatregelen

Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen.



Assortiment Mepilex® Lite (steriel)

Afmeting	Z-indexnr.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
6 x 8,5 cm	14926857	284000	5 x 1 stuk	70 stuks
10 x 10 cm	14926865	284100	5 x 1 stuk	50 stuks
15 x 15 cm	14926873	284300	5 x 1 stuk	50 stuks
20 x 50 cm	14926881	284500	2 x 1 stuk	12 stuks