


Mepore® Pro

Douchebestendig, zelfklevend chirurgisch pleister

Mepore® Pro is een waterbestendig, zelfklevend chirurgisch pleisterverband, uitermate geschikt voor droge tot vochtige chirurgische wonden. Dankzij zijn huidvriendelijke, polyacrylaat kleeflaag op waterbasis staat Mepore® Pro garant voor een veilige fixatie. Douchen wordt mogelijk dank zij de impermeabele film.

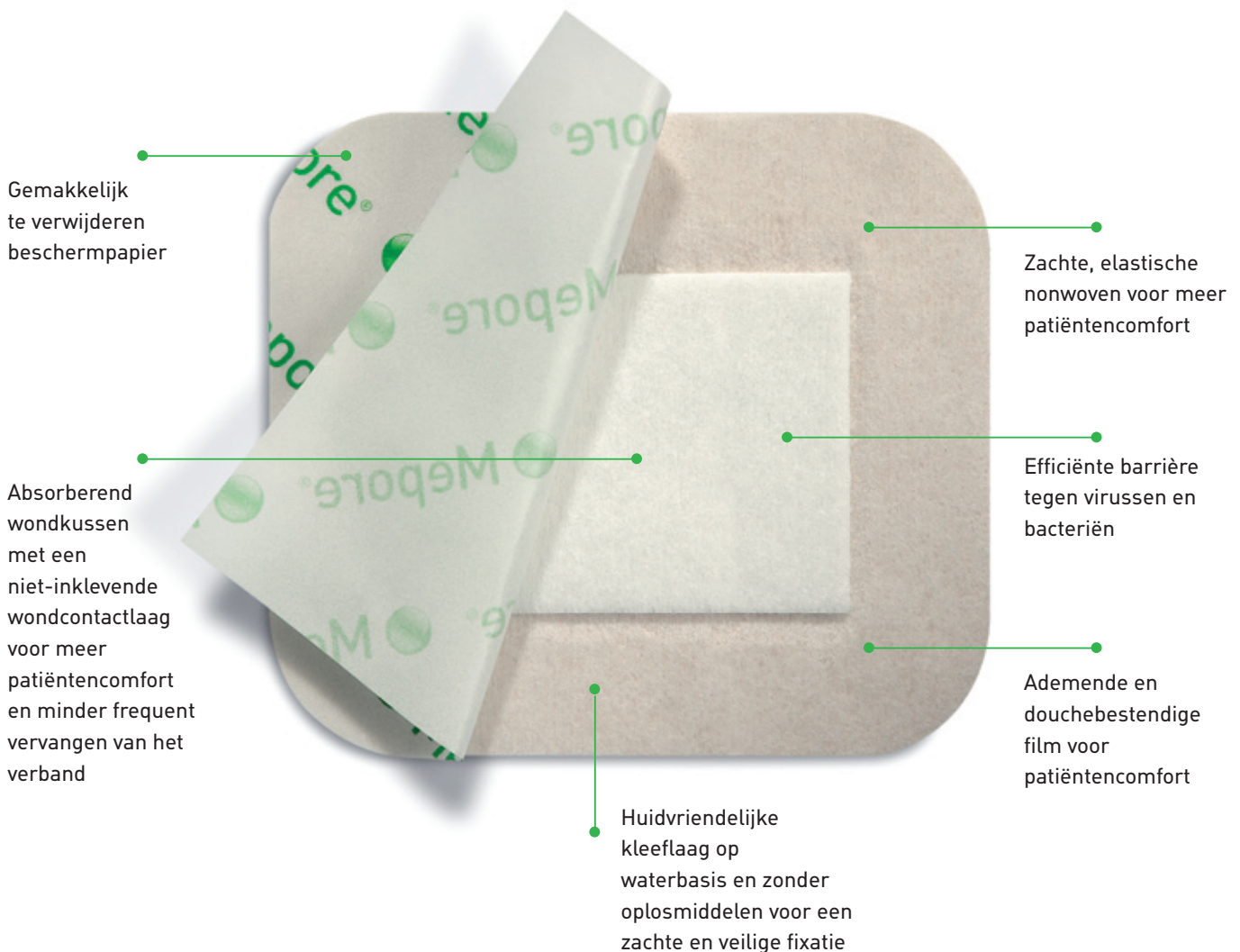

Gebruiksaanwijzing



Haal het verband uit de verpakking.



Verwijder beide overlappende bescherm-papieren, zodat de kleeflaag vrijkomt en men het verband kan aanbrengen.



Plaats in de anatomische houding het verband op de huid, zonder het uit te rekken. Verwijder zachtjes het overige deel van het bescherm papier. Strijk Mepore® Pro glad zodat het verband goed kleeft.

Hoe werkt Mepore® Pro?

De film op de rugzijde laat toe om met het verband te douchen en beschermt de wond tegen contaminatie. Deze film voorkomt ook dat kledij en bedlinnen bevuild worden door bloed en doorsijpelend wondvocht. Dankzij het sterk absorberende wondkussen en de hoge verdamping met de film op de rugzijde, biedt het verband een goed wondvochtbeheer.

De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis garandeert een veilige fixatie en is tegelijk zacht voor de huid.

Het gemakkelijk te verwijderen bescherm papier laat een steriel gebruik toe en vergemakkelijkt het aanbrengen van het verband. Het stabiele laminaat tussen de buitenste lagen vereenvoudigt tevens de applicatie.

Voordelen van Mepore® Pro

- Douchen kan
- Beschermt de wond tegen water, virussen en bacteriën
- Een hogere absorptiecapaciteit vergeleken met Mepore®
- Ademende film
- Huidvriendelijke kleeflaag op waterbasis
- Hypoadherente wondcontactlaag vermindert het risico op verkleving in de wond
- Weinig wrijving met kleren en bedlinnen
- Gemakkelijk te verwijderen bescherm papier voor een veilig en steriel gebruik
- Afgeronde hoeken voor een veilige fixatie (voor alle maten kleiner dan 9x15 cm)



Toepassingen

- droge tot vochtige wonden
- chirurgische wonden
- snij- en schaafwonden
- wanneer de patiënt wil douchen

Hoe frequent vervangen?

Hoe vaak men het verband moet vervangen hangt af van de wondconditie. Om het verband te verwijderen dient men een hoek op te heffen en het verband zachtjes in de richting van de haargroei eraf te trekken.

Voorzorgsmaatregelen

Men moet er zorgvuldig op toezien dat Mepore® Pro in de anatomische houding en zonder tractie wordt aangebracht om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Zeker wanneer Mepore® Pro wordt aangebracht op gewrichten (vb na heupoperaties) is dit een belangrijk aandachtspunt.

Assortiment Mepore® Pro (steriel)

Afmeting	Z-indexnr.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
6 x 7 cm	14604752	670820	60 x 1 stuk	480 stuks
9 x 10 cm	15126870	670920	50 x 1 stuk	320 stuks
9 x 15 cm	15126889	671020	50 x 1 stuk	320 stuks
9 x 20 cm	14604787	671120	30 x 1 stuk	180 stuks
9 x 25 cm	14604795	671220	30 x 1 stuk	180 stuks
9 x 30 cm	14604809	671320	30 x 1 stuk	270 stuks