

Mepore® Film

Semi-permeabel, transparant zelfklevend filmverband

Mepore® Film is een transparant zelfklevend filmverband, ideaal als secundair verband of als primair verband bij allerlei schone wonden in de granulatiefase. Het aanbrengsysteem van Mepore® Film is ontwikkeld voor een gemakkelijk gebruik.

Ondersteunende beschermfolie en papieren frame, voor een gemakkelijke applicatie




Transparante, ademende, elastische film in polyurethaan voor een optimaal wondmilieu en meer patiëntencomfort

Waterproof en impermeabel voor virussen en bacteriën

Huidvriendelijke kleeflaag uit polyacrylaat voor een zachte en veilige fixatie


Gebruiksaanwijzing

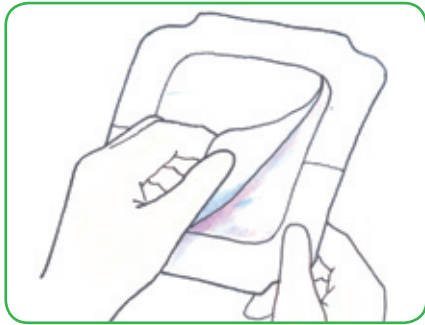

Enkel voor de afmetingen 10 x 25 cm en 15 x 20 cm: verwijder het uitgesneden papier in het midden en gooi dit weg.



Verwijder de beschermfolie (met Mepore-print) om de kleeflaag vrij te maken.

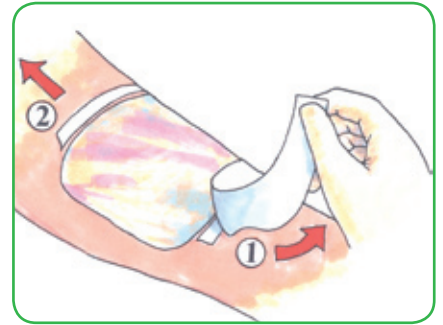

Positioneer het verband op de huid en strijk het goed glad. Verwijder nu het papieren frame. Vervolgens kan men de twee witte papieren zijflapjes verwijderen. Let erop dat het verband niet uitgerekt wordt bij het aanbrengen!

Hoe werkt Mepore® Film?

Mepore® Film zorgt voor een flexibele, transparante beschermlaag. Het past zich perfect aan aan lichaamscontouren en oneffen oppervlaktes. Het verband vormt een barrière tegen doorsijpelend wondvocht en tegen virussen en bacteriën. Mepore® Film onderhoudt een vochtig wondmilieu. Overtollig vocht van zowel de wond als de omringende huid kunnen gemakkelijk verdampen.

Voordelen van Mepore® Film

- Hoge mate van verdamping
- Gemakkelijk te gebruiken, ook met handschoenen
- Vermindert het risico om nieuwgevormd weefsel te beschadigen
- Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
- Huidvriendelijke kleeflaag
- Veilige fixatie
- Behoudt een vochtig wondmilieu
- Beschermt tegen virussen en bacteriën en zorgt voor een barrière tegen lekkage
- Waterdicht

Toepassingen

Mepore® Film kan gebruikt worden als een secundair fixatieverband om primaire verbanden te bedekken, zoals bijvoorbeeld hydrogels, alginaten en schuimverbanden. Mepore® Film kan ook gebruikt worden als primair verband voor een brede waaier van propere wonden in de granulatiefase, zoals:

- oppervlakkige brandwonden
- IV - insteekpunten
- schaafwonden
- scheurwonden (Skin Tears)
- donor sites
- eerstegraads drukletsels
- gesloten chirurgische wonden
- preventie van huidbeschadiging door frictie of vocht

Voorzorgsmaatregelen

Mepore® Film mag niet gebruikt worden op diepe wonden waarbij spieren, pezen of bot blootliggen en evenmin op derdegraads brandwonden. Mepore® Film is niet geschikt voor patiënten gevoelig voor acrylic-lijm.



Assortiment Mepore® Film (steriel)

Afmeting	Z-indexnr.	Art.nr.	Binnenverp.	Transportverp.
6 x 7 cm	14196727	270600	100 x 1 stuk	400 stuks
6 x 7 cm	14196719	270670	10 x 1 stuk	100 stuks
10 x 12 cm	14196743	271500	50 x 1 stuk	200 stuks
10 x 12 cm	14880776	271570	10 x 1 stuk	50 stuks
10 x 25 cm	14196778	272500	20 x 1 stuk	100 stuks
10 x 25 cm	14880768	272570	10 x 1 stuk	50 stuks
15 x 20 cm	14196786	273000	10 x 1 stuk	80 stuks